



**DefiStore.de Deutschland GmbH**

Birkenallee 34  
49076 Osnabrück  
Tel. +49 (0) 541 600 52 8 -3  
Fax +49 (0) 541 600 52 8 -6  
vertrieb@defistore.de

[www.defistore.de](http://www.defistore.de)

## LEBEN RETTEN MIT DEM ZOLL AED3!



### Höhere Überlebenschancen

Dank der Kombination von Echtzeit-Feedback während der Reanimation, klaren Anweisungen und einer effektiven Defibrillation, höhere Überlebenschancen.



### Geringe Folgekosten

Durch die Langlebigkeit und die universelle Einsatzmöglichkeit der Verbrauchs- und Zubehörartikel (z.B. eine Elektrode für Erwachsene und Kinder) sind die AEDs von ZOLL in der Erhaltung nachhaltig und kosteneffizient.



### Einfache Bildsprache

Alle ZOLL Defis sprechen immer mindestens die lokale Sprache sowie eine einfache Bildsprache.



### Einfache Anwendung



Durch die Kombinationen von einfachen Bildern und gesprochenen Handlungsanweisungen helfen ZOLL Defis jedem dabei, im Ernstfall ein unerwarteter Held zu werden.

Die Geräteanwendung konnte zudem durch Tests mit Erst- und Laienhelfern optimiert werden.

### Bereit dank Fernwartung



Einen Defi anzuschaffen ist eine sehr gute Idee, ihn einsatzbereit zu halten ausgezeichnet. ZOLL gibt Ihnen dafür mit seinen Fernwartungslösungen ein wichtiges Werkzeug an die Hand – und das für ALLE Defis am Markt.

### Eigener Kindermodus




Der ZOLL Defi ist auch für die Anwendung bei Kindern optimiert und somit für alle Patienten geeignet.

# HELDEN FÜRS HERZ

powered by



Lebensrettung braucht Qualität!

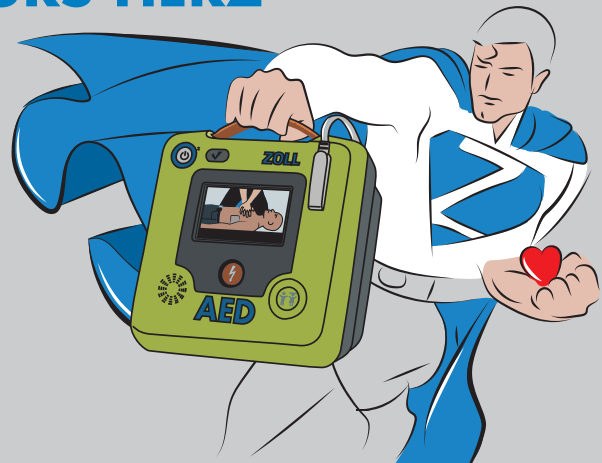

## LEITFADEN FÜR ERSTHELFER

## 1 PATIENTEN CHECK

- Bewusstlose Person laut ansprechen
- Atmung überprüfen
- Defi/AED holen lassen
- Notruf wählen

Deutschland 112




## 2 HERZDRUCKMASSAGE

- Oberkörper freimachen
- Herzdruckmassage beginnen

Verhältnis De-/Kompression 1:1  
5–6cm tief, 100–120 schnell


Wenn notwendig,  
HDM so kurz wie  
möglich unterbrechen!

30x HDM  
2x Beatmen

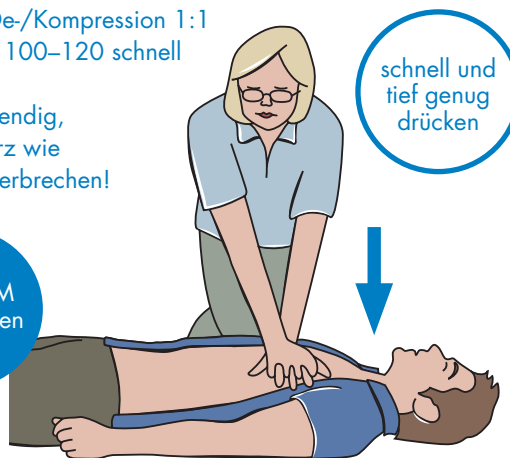

## 3 DEFI BRINGEN

- AED einschalten
- Anweisungen des Defis befolgen

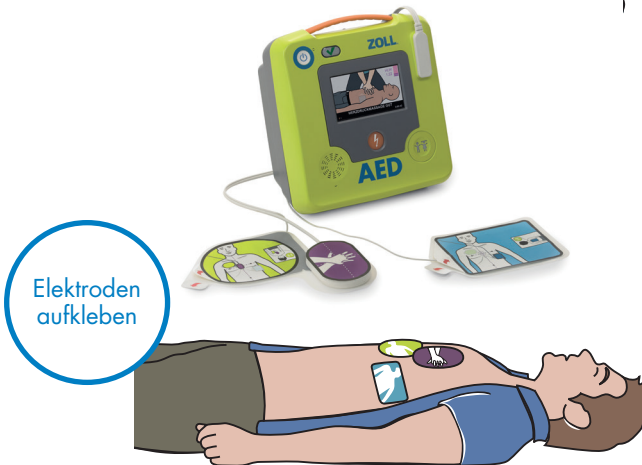

## 4 SCHOCK ABGEBEN

- Anweisungen des Defis befolgen
- Schocktaste drücken und/oder
- zurück zu 2

Solange  
Wiederholen  
bis der  
Rettungsdienst  
eintrifft!

